




颞下颌关节被动张口训练系统

型号：CY-LJ-01

微信小程序使用手册

操作前请仔细阅读本手册

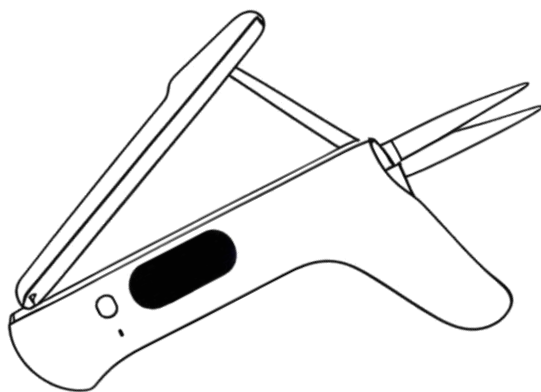

概 要

本手册旨在介绍颞下颌关节被动张口训练系统微信小程序的操作方法

软件名称：张口训练系统

软件型号：**MOT_V2**

软件版本：2.2.5

开发人名称：**苏州全新美治智能科技有限公司**

开发人住所：昆山市花桥镇逢星路 586 号 6 号房二楼 2001 室、2002 室、2006 室

开发人联系方式：昆山市花桥镇逢星路 586 号 6 号房二楼 2001 室

全国服务热线：400-XXXX-XXXX

官方网站：www.sz-qxmz.com

修订日期：2025 年 10 月

商 标



此注册商标为苏州全新美治智能科技有限公司所有

文件历史记录

文件编号	RD-H-03		
文件标题	颞下颌关节被动张口训练系统 CY-LJ-01 使用说明书		
文件履历			
版本	编制	日期	更改内容（条款）
V1.0	梁嘉豪	2024.11	首次发布
V2.0	梁嘉豪	2025.10	更新格式，加入插图，删除张口阻力测试等内容

目 录

概 要	2
目 录	4
第一章 进入小程序	1
1 进入微信小程序	1
1.1 查找进入	1
1.2 搜索进入	2
1.3 进入微信小程序	3
2 选择用户/监护	4
2.1 找到登录入口	4
2.2 选择用户或监护	5
第二章 用户功能	6
1 用户注册	6
2 用户登录	7
3 蓝牙连接	8
3.1 查找设备	8
3.2 连接设备	9
3.3 重新登录	10
4 训练过程	11
4.1 训练方案	11
4.2 训练监测	12
5 其他功能	13
5.1 数据统计和展现	13
5.2 被监护功能	14
5.3 用户个人中心	15
第三章 监护功能	16
1 监护注册	16
2 监护登录	17
3 监护过程	18
3.1 添加删除	18
3.2 查看用户数据	19
3.3 监护个人中心	20

第一章 进入小程序

1 进入微信小程序

1.1 查找进入



a



b

图 1 扫描进入微信小程序

打开微信“扫一扫”（图 1a），扫描图 1b/本使用手册封面/外包装盒上的小程序二维码即可直接进入微信小程序“张口训练系统”。

1.2 搜索进入




图 2 搜索进入微信小程序

如图 2a 所示，点击微信右上角的“搜索图标”，输入“张口训练系统”（图 2b），点击搜索结果中“张口训练系统”即可直接进入微信小程序“张口训练系统”。

1.3 进入微信小程序



a

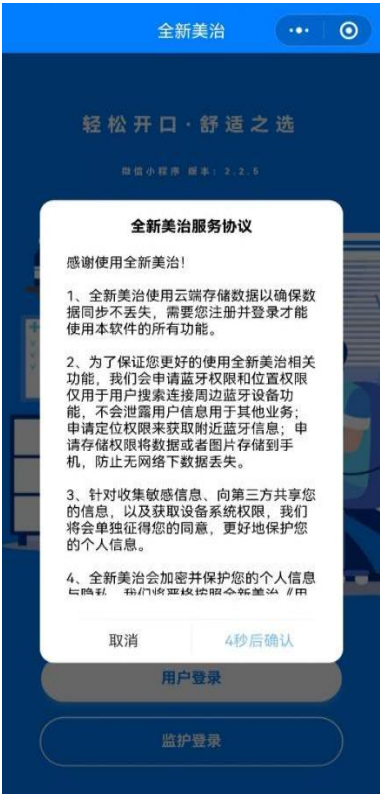

b

图 3 进入小程序

进入“张口训练系统”小程序，如图 3a 所示。首次使用时，会弹出服务协议（图 3b），请在倒计时结束后，仔细阅读并点击同意继续。

2 选择用户/监护

2.1 找到登录入口

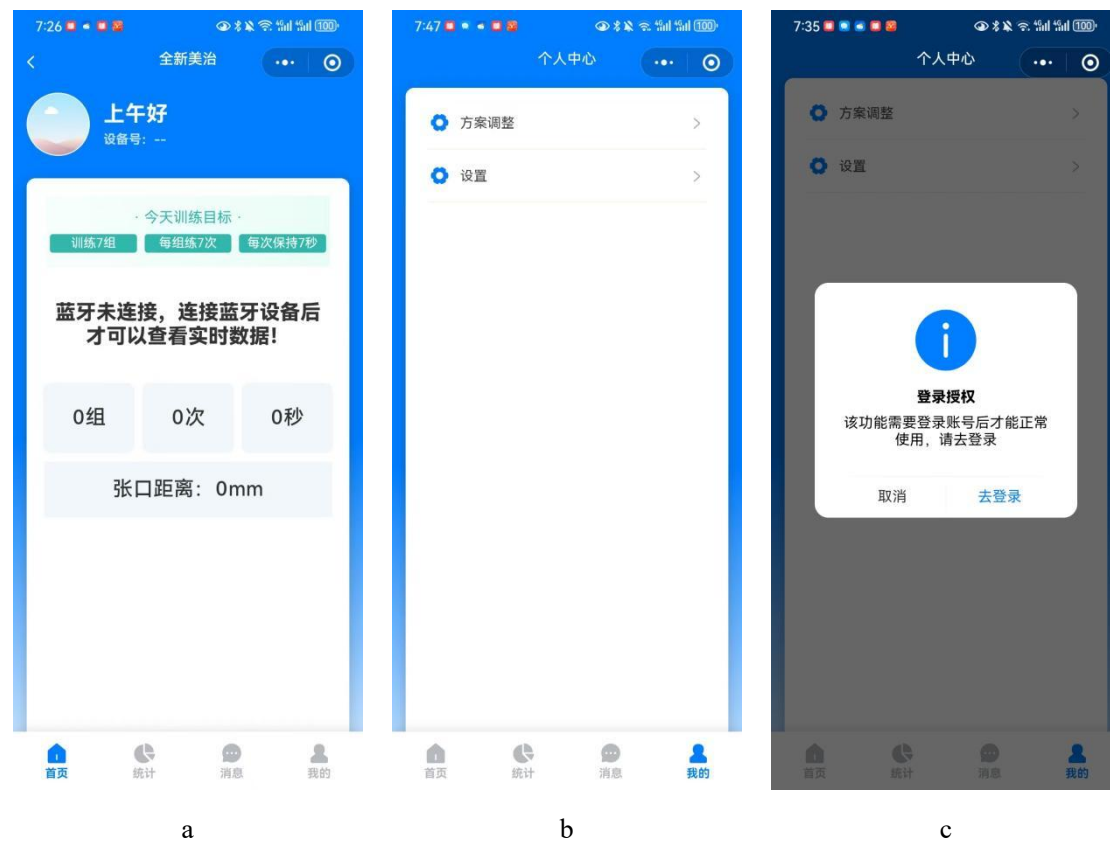


图 4 找到登录入口

- 1) 用户初次使用, 需要注册账号后方可连接设备。如图 4a 所示, 点击“我的”, 进入如图 4b 所示画面;
- 2) 点击如图 4b 所示画面中的 “设置”, 进入如图 4c 所示画面;
- 3) 点击如图 4c 所示画面中的 “去登录”, 进入登录画面。

2.2 选择用户或监护



图 5 登录

- 1) 图 5a 是登录画面，您可选择“用户登录”或者“监护登录”；
- 2) 点击图 5a “用户登录”，进入图 5b 所示“用户登录”画面；
- 3) 点击图 5a “监护登录”，进入图 5c 所示“监护登录”画面；

第二章 用户功能

1 用户注册

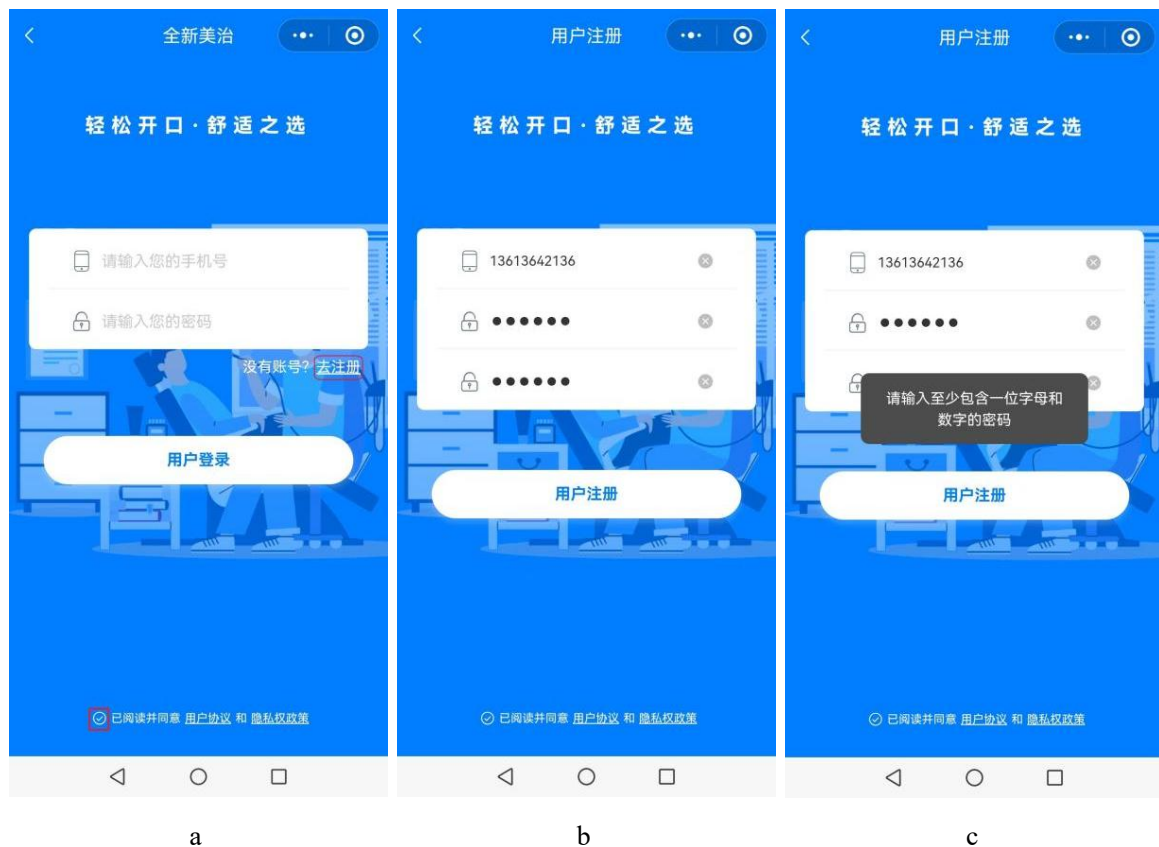


图 6 用户注册

- 1) 如尚无小程序账号，请先勾选底部“已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策》”，随后点击“去注册”，如图 6a 所示；
- 2) 进入注册页面后，依次填写手机号与密码，勾选同意相关协议，并点击“用户注册”，如图 6b 所示；
- 3) 请注意，须设置至少包含一位字母和一位数字的密码。若不符合要求，小程序将弹出相应提示，如图 6c 所示。

2 用户登录

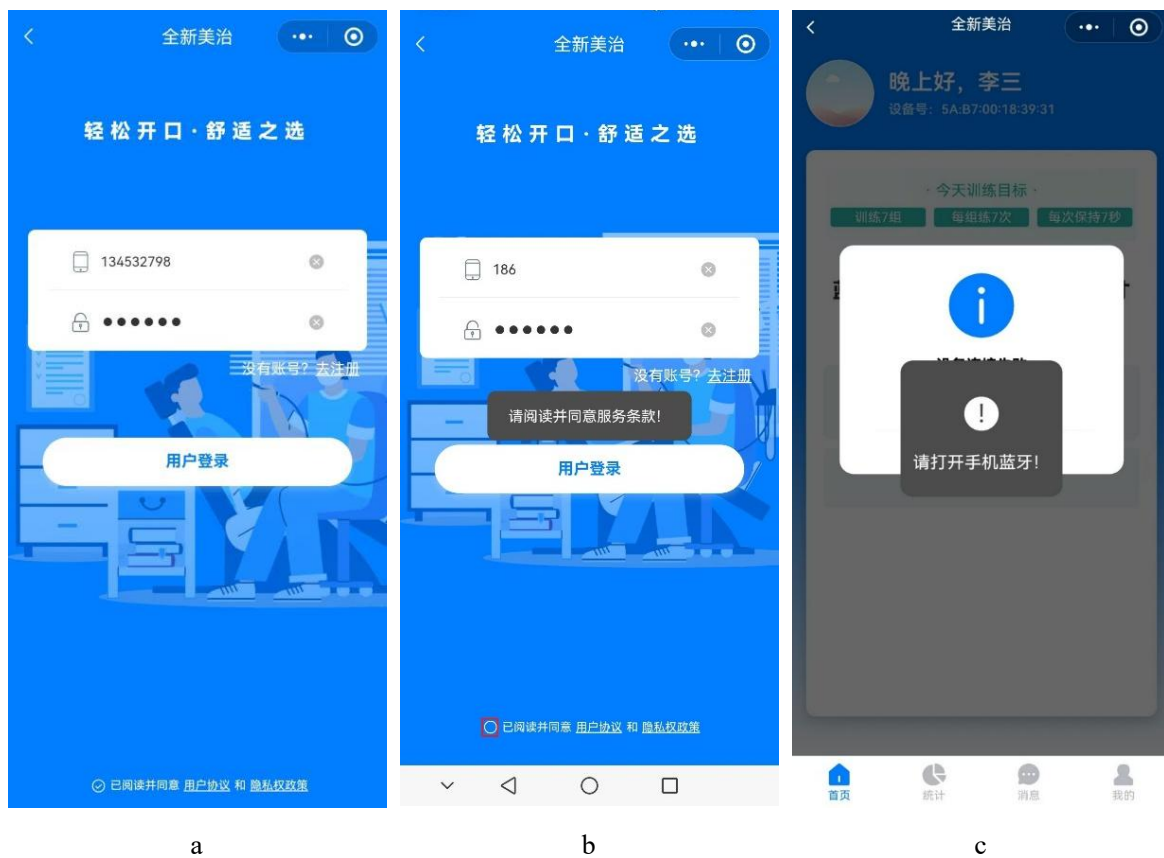


图 7 用户登录

- 1) 进入用户登录页面后，依次填写手机号与密码，如图 7a 所示；
- 2) 请注意，请保证小程序“已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策》”被勾选。若不符合要求，小程序将弹出相应提示，如图 7b 所示；
- 3) 用户首次登录时，需保持手机蓝牙及定位功能处于开启状态。如功能未开启，小程序会自动弹出提示，引导用户启用蓝牙功能，如图 7c 所示。

3 蓝牙连接

3.1 查找设备

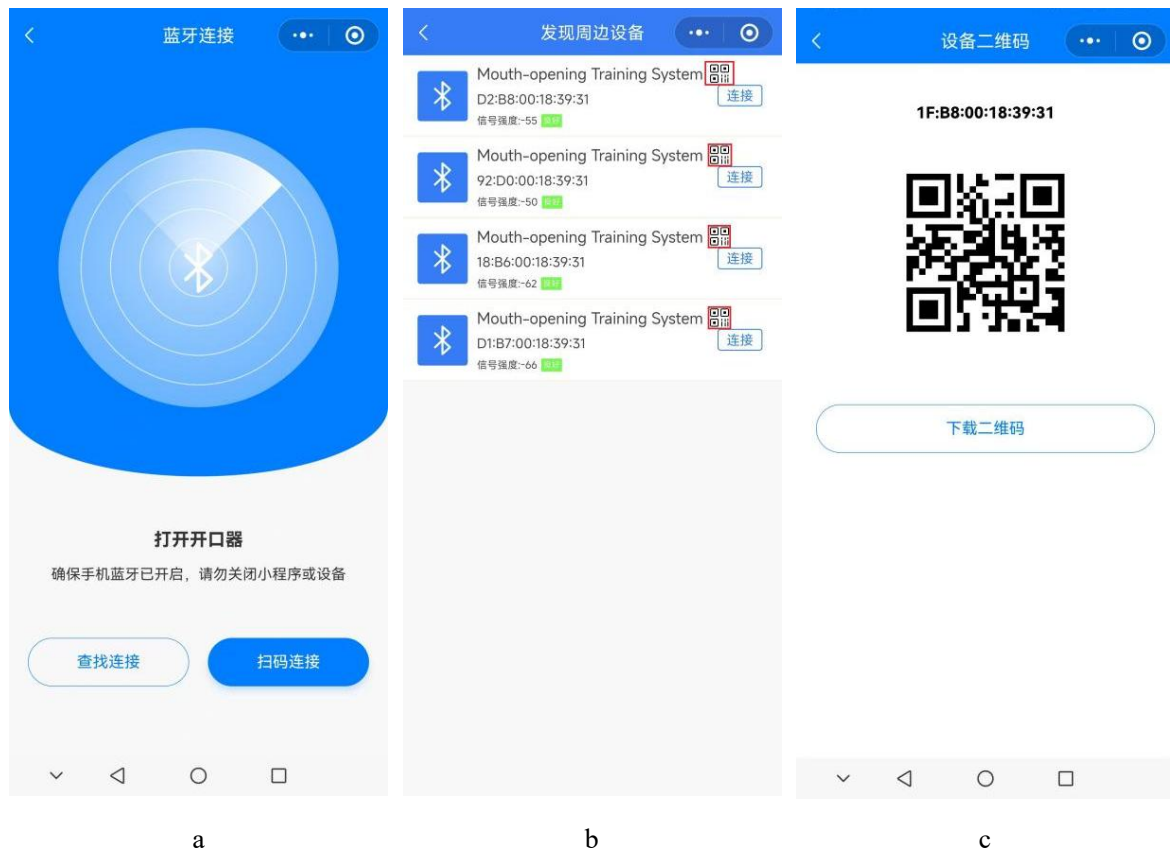


图 8 查找设备与去主页

- 1) 若小程序未绑定任何张口器主机，将显示如图 8a 所示的界面。您可以通过“查找连接”或“扫码连接”功能来添加并绑定您要使用的张口器；
- 2) 点击图 8a 中的“查找连接”按钮后，小程序将自动搜索并显示蓝牙范围内所有可用开口器主机列表（见图 8b）。
- 3) 小程序支持自动生成张口器主机的专属二维码。如图 8b 所示，点击红框内的二维码图标，即可生成并下载所需张口器的二维码（见图 8c）。

注意：如需小程序自动搜索并显示附近所有开口器主机（图 8b），请确保手机蓝牙和定位功能均已开启！！！！

3.2 连接设备

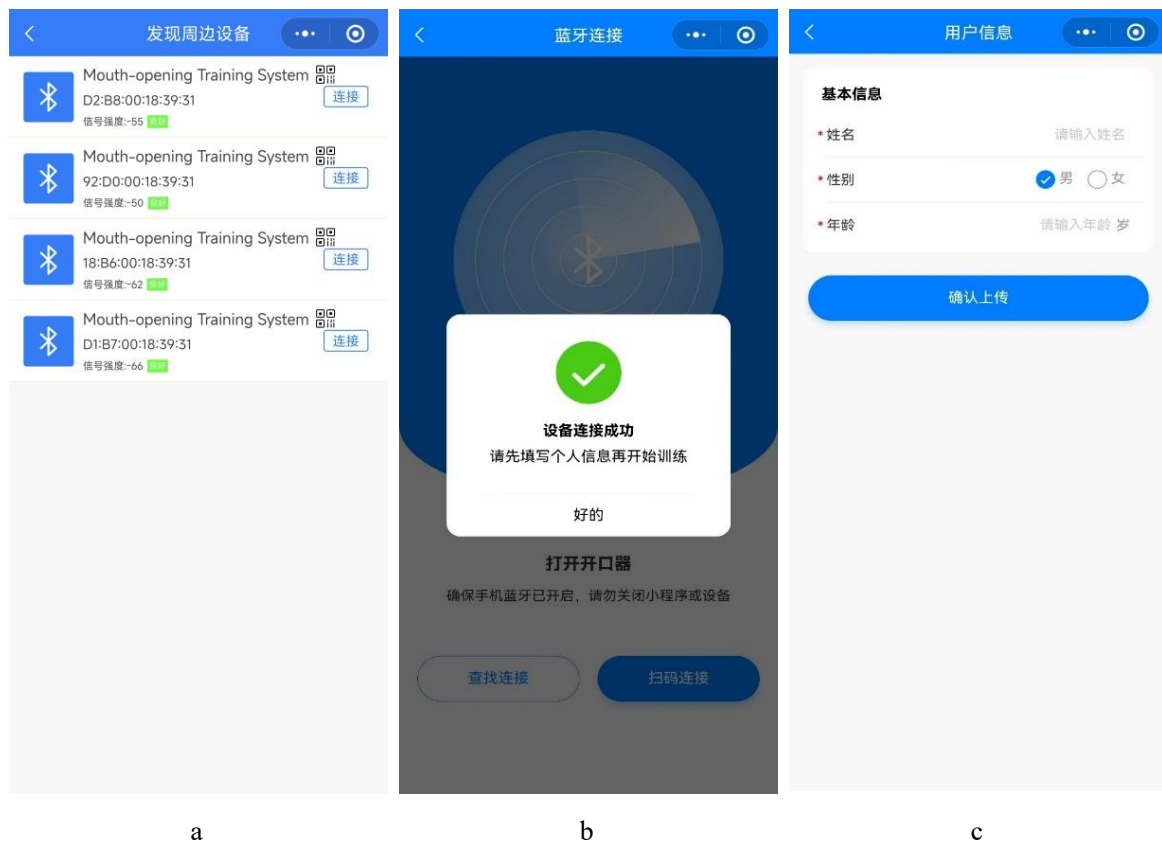


图 9 连接设备

- 1) 如图 9 所示，您可以从列表中选择“连接”您需要使用的张口器主机；
- 2) 您还可以通过点击图 9b 中的“扫描连接”按钮，扫描所需张口器的二维码，完成小程序和所需主机的蓝牙连接；
- 3) 如图 9 b 所示，成功建立蓝牙连接后，小程序首先会提示“连接成功”，继而要求用户填写个人信息（图 9c）。请您正确填写并“确认上传”（图 9c）后方可开始训练。

3.3 重新登录



图 10 去主页

- 1) 已绑定了张口器主机的小程序退出登录后, 再次使用时需重新登录。再次登录后, 小程序将显示如图 10a 所示的界面。和图 9 一样, 您仍可以通过点击“查找连接”或“扫码连接”(图 10a)来添加并绑定您要使用的张口器;
- 2) 您也可以通过点击图 10a 中的“去主页”按钮(红框内), 直接进入小程序主页, 访问已绑定的张口器主机;
- 3) 您也可以点击图 10b 红框内的“统计”“消息”或“我的”按钮, 查看统计数据或进行其他操作;
- 4) 图 10c 是点击图 10b “统计”按钮后, 小程序显示的界面。

4 训练过程

4.1 训练方案

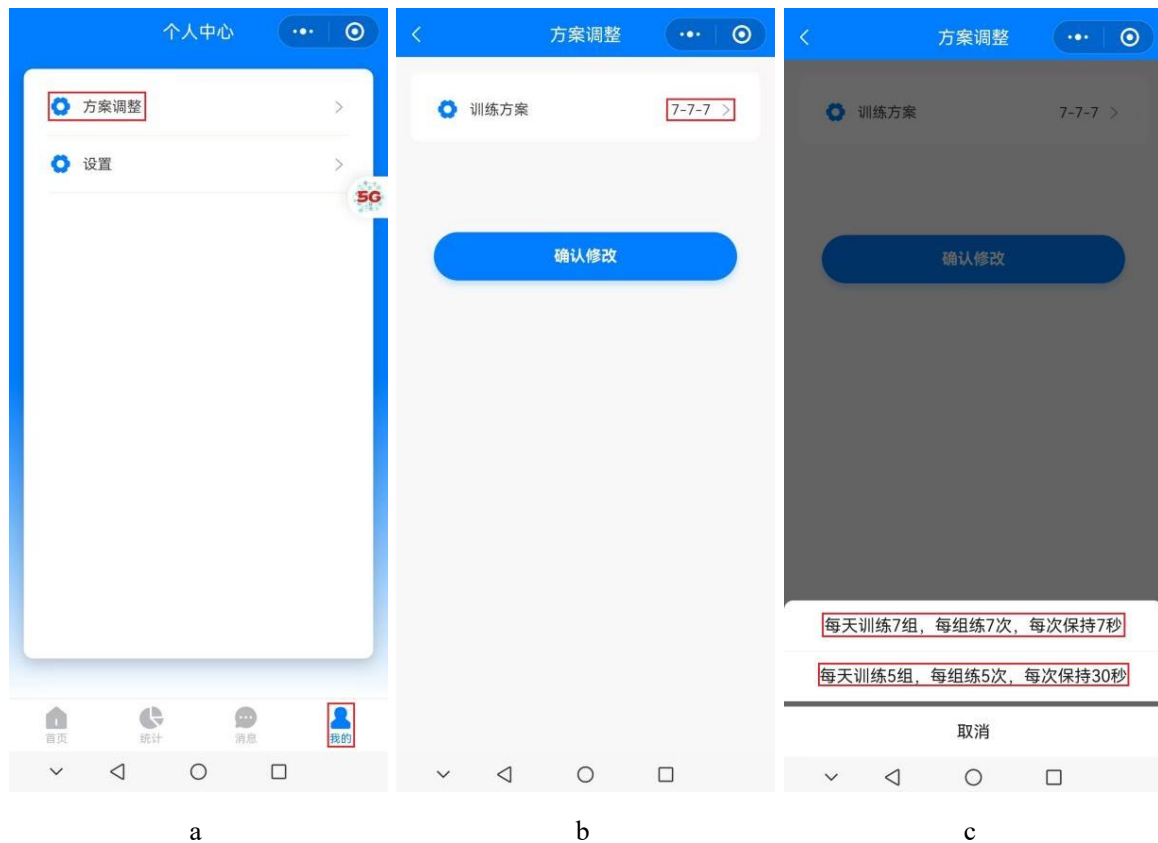


图 11 训练方案调整

- 1) 如图 11a 所示，在“我的”页面（底部红框）点击“方案调整”选项，即可进入图 11b 所示的页面；
- 2) 点击图 11b 中红框所示按钮，页面将跳转至图 11c；
- 3) 在图 11c 中，从红框所列方案中选择其一，并点击“确认修改”以完成训练方案修改。

4.2 训练监测



图 12 训练记录

- 1) 微信小程序与张口器主机建立连接后, 可在小程序端实时监测您的训练数据, 并能判断当前训练是否满足训练方案要求。图 12a 展示了训练有效时的小程序界面显示;
- 2) 当微信小程序与主机建立连接后, 若主机内存在未同步的历史数据, 小程序将提示有多少条数据未上传 (图 12b), 张口器主机将首先执行数据上传。如图 12c 所示, 当所有历史数据上传完成后, 小程序将给出提示信息。
- 3) 当微信小程序与张口器主机成功建立连接后, 系统将自动检测主机内是否存在未同步的历史数据。若检测到未同步数据, 小程序将在交互界面中向用户清晰地显示具体未上传的数据条数, 并同步展示"立即上传"操作按钮 (见图 12b)。用户点击该按钮后, 小程序开始从张口器主机获取待同步的历史数据。如图 12c 所示, 待所有历史数据均完成上传并校验通过后, 小程序会通过弹窗或状态栏向用户反馈"数据上传已完成, 您可继续使用设备"的完成提示信息。

注意: 如果张口器主机未上传的数据量较大, 请勿关机, 耐心等待数据上传完成 (通常 1 分钟内可完成), 直至出现图 12c 所示的提示!!!

5 其他功能

5.1 数据统计和展现

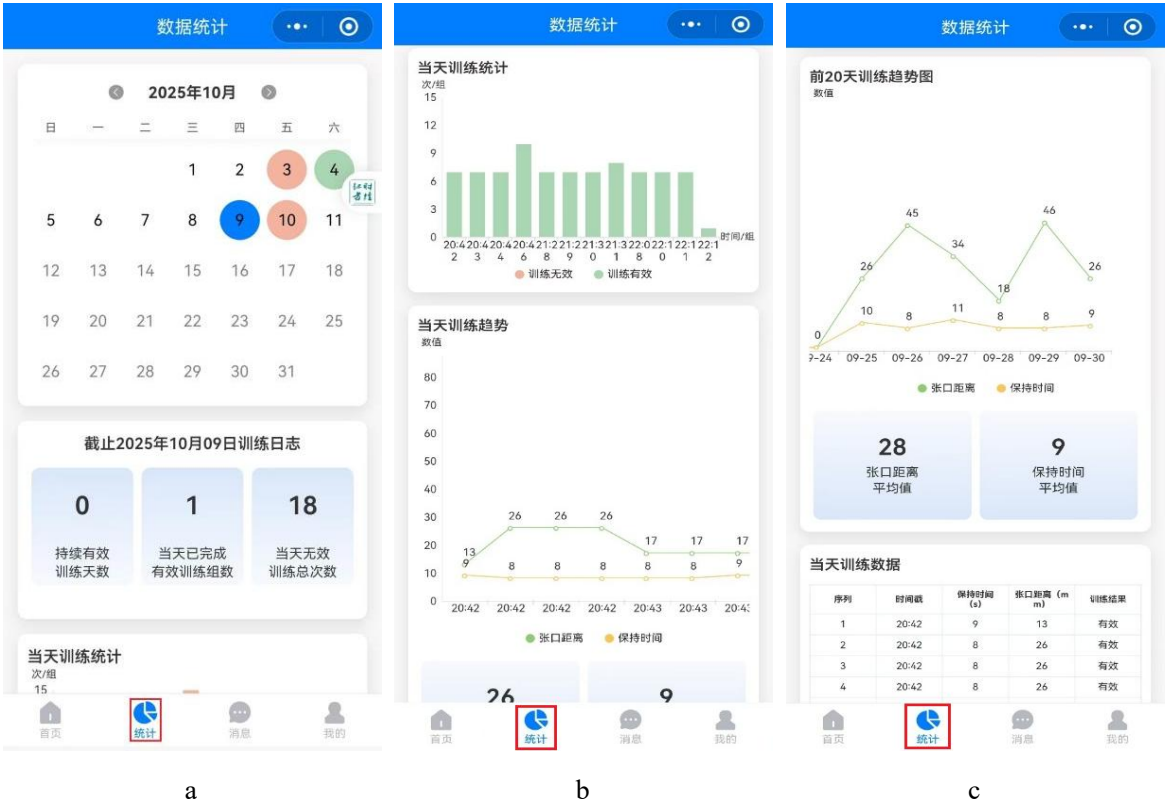


图 13 数据统计和展现

1) 小程序提供数据统计与图表可视化功能。如图 13 所示，点击红框内的“统计”图标，即可查看您的训练日志、当日训练统计、趋势图及详细数据列表。

5.2 被监护功能

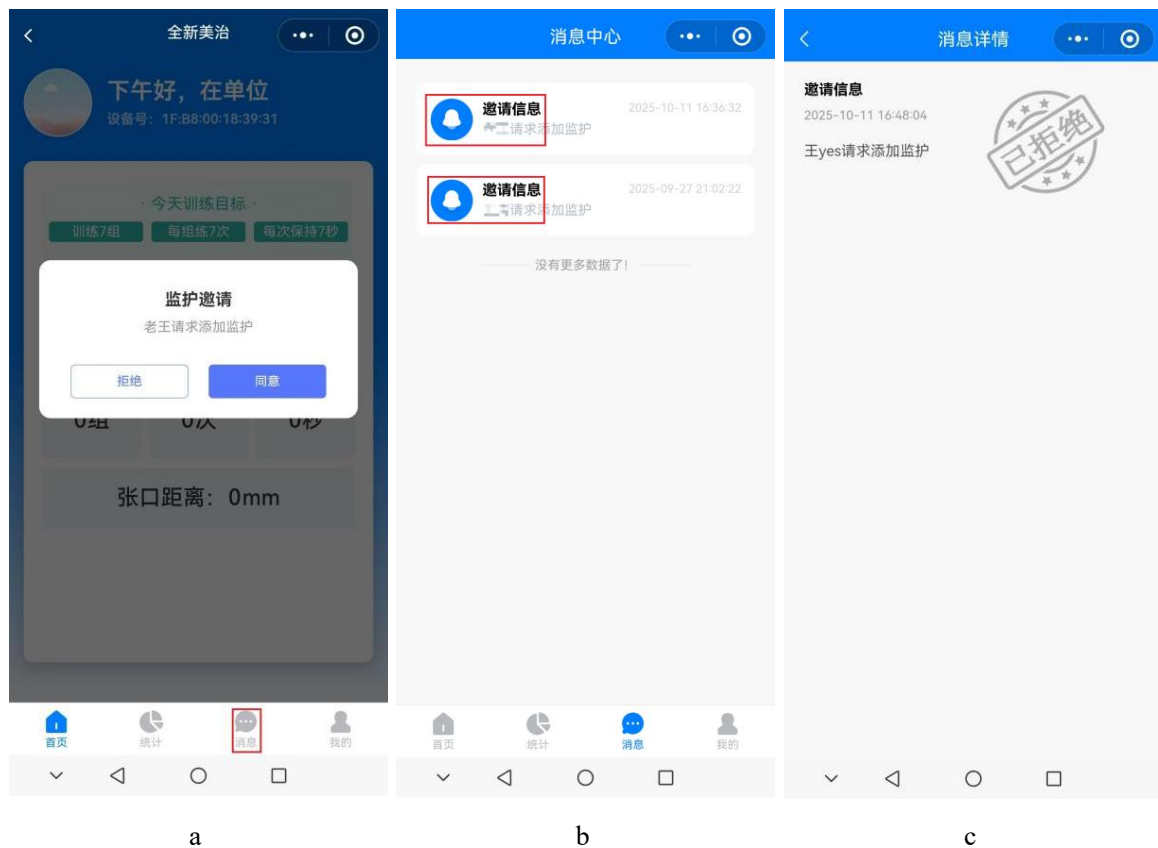


图 14 被监护功能

- 1) 小程序提供了监护功能。如图 14a 所示，用户在收到邀请后，可自主选择同意或拒绝；
- 2) 点击底部导航栏的“消息”图标（图 14a 红框处），即可访问“消息中心”；
- 3) 如图 14b 所示，消息中心会记录相关的邀请详情，例如邀请人与邀请时间；
- 4) 点击消息中心内红框标示的“邀请信息”图标（图 14b 红框处），即可进入消息详情界面（图 14c）。在该界面中，您可以查看每条邀请的状态。例如，图 14c 显示用户“王 yes”发出的监护邀请已被拒绝。

5.3 用户个人中心

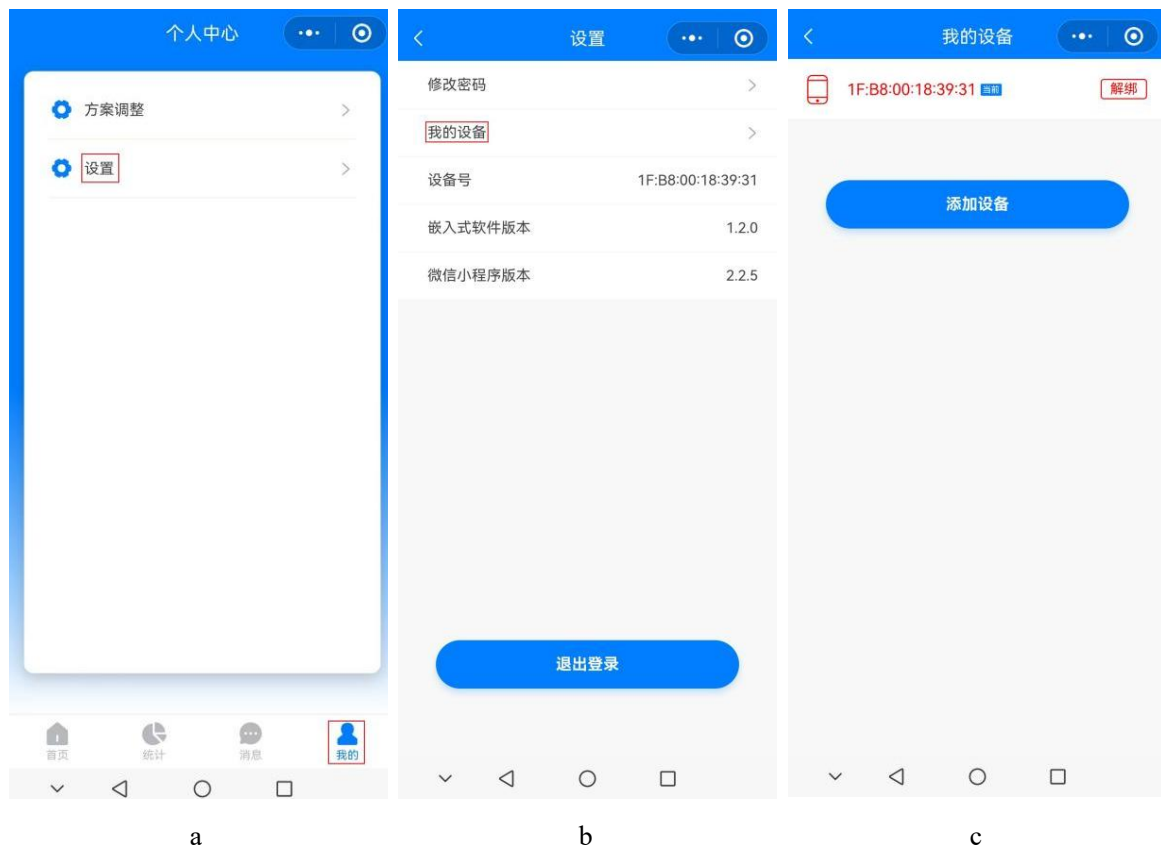


图 15 用户个人中心

- 1) 点击底部导航栏的“我的”图标（图 15a 红框处），即可访问“方案调整”与“设置”功能；
- 2) 点击“设置”图标（图 15a 红框处）进入设置界面（图 15b），在此您可以：修改密码、进入“我的设备”界面、查看已绑定的激活主机的设备号、嵌入式软件版本，以及微信小程序版本；
- 3) 点击图 15b 中的“我的设备”图标，即可进入“我的设备”管理界面。在此界面，您可以解绑当前已绑定的主机，或添加绑定新的张口器主机。

第三章 监护功能

1 监护注册

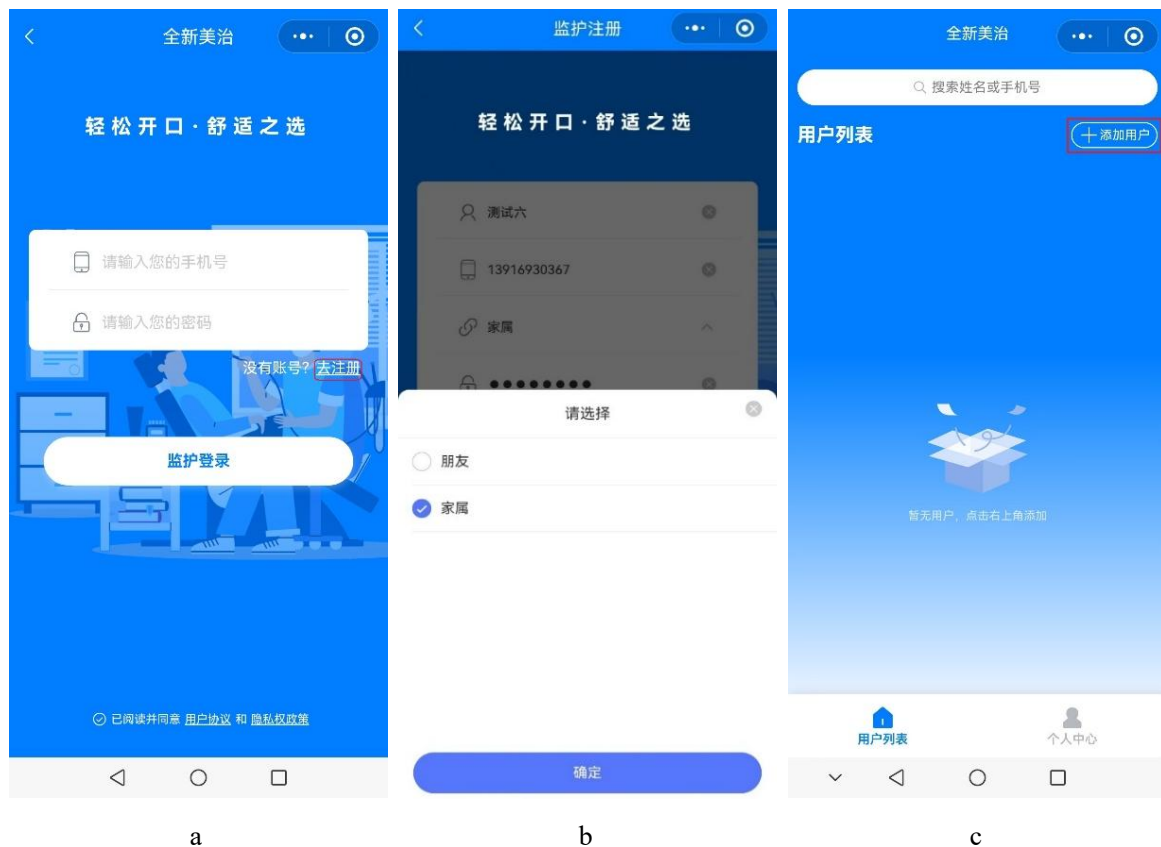


图 16 监护注册

- 1) 点击图 16a 红框处“去注册”图标，即可访问“监护注册”界面；
- 2) 请在图 16b 所示的界面中填写您的个人信息，并选择您与被监护人的关系（如朋友或家属），最后点击“确认”按钮，即可进入用户列表界面（图 16c）完成监护注册。

2 监护登录

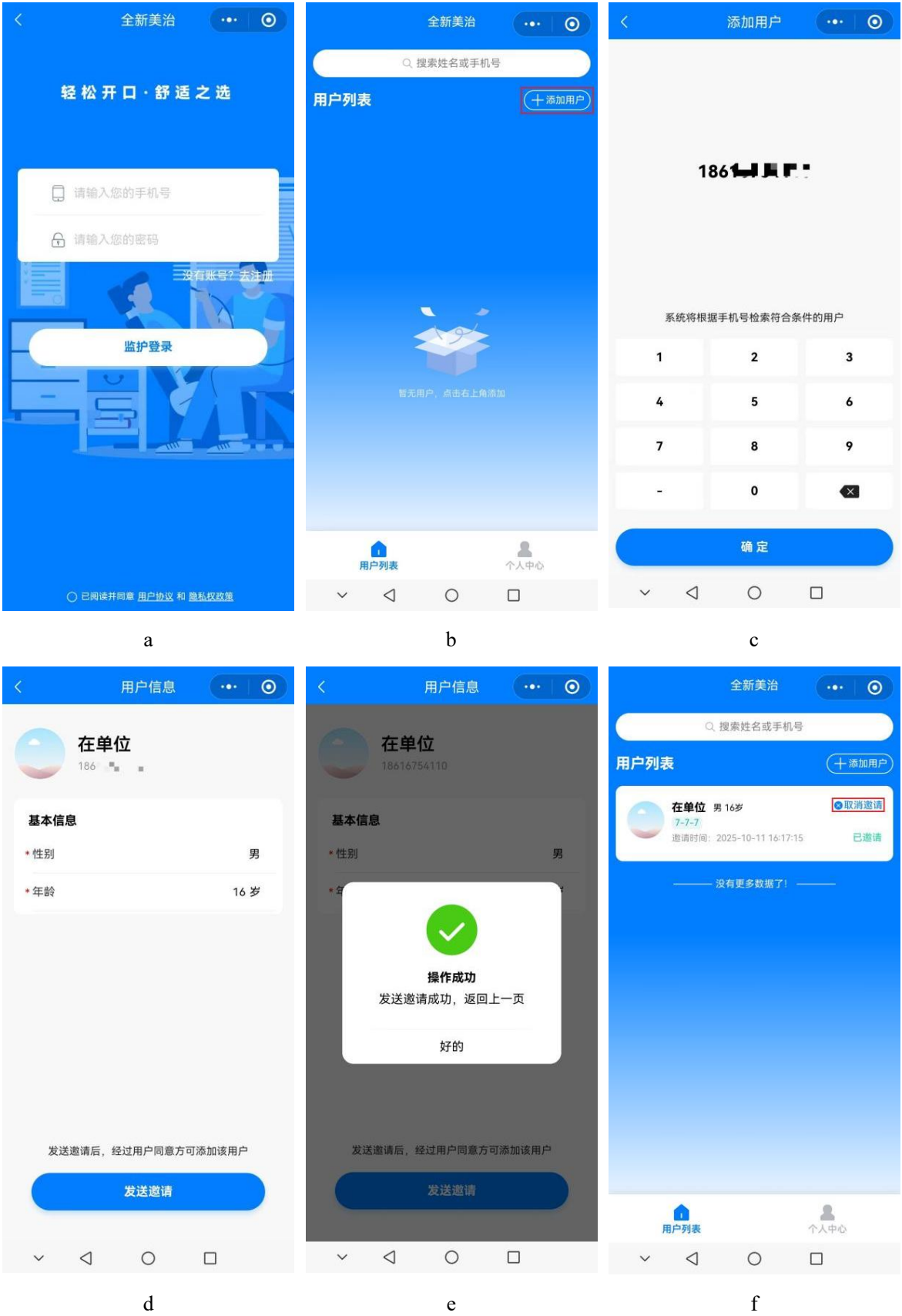


图 17 监护登录

- 1) 点击图 17a “监护登录”，即可访问“用户列表”界面（图 17b）；
- 2) 点击图 17b “添加用户”，即可访问“添加用户”界面（图 17c）；在图 17c 界面中添加您希望监护的用户手机号后，点击“确定”；
- 3) 点击图 17b 中的“添加用户”按钮，即可进入“添加用户”界面（图 17c）；在该界面中输入您希望监护的用户手机号后，点击“确定”按钮，进入“用户信息”界面（图 17d）；
- 4) 在图 17d 的“用户信息”界面中，确认需监护用户的个人信息无误后，点击“发送邀请”。随后，小程序将显示提示“发送邀请成功，返回上一页”（图 17e），请点击该提示框中的“好”以完成操作；
- 5) 图 17e 展示了您已添加监护的用户名单。若对方尚未接受邀请，您可以点击其信息旁的“取消邀请”按钮（位于红框标注区域内），以撤销对该用户的邀请。

3 监护过程

3.1 添加删除

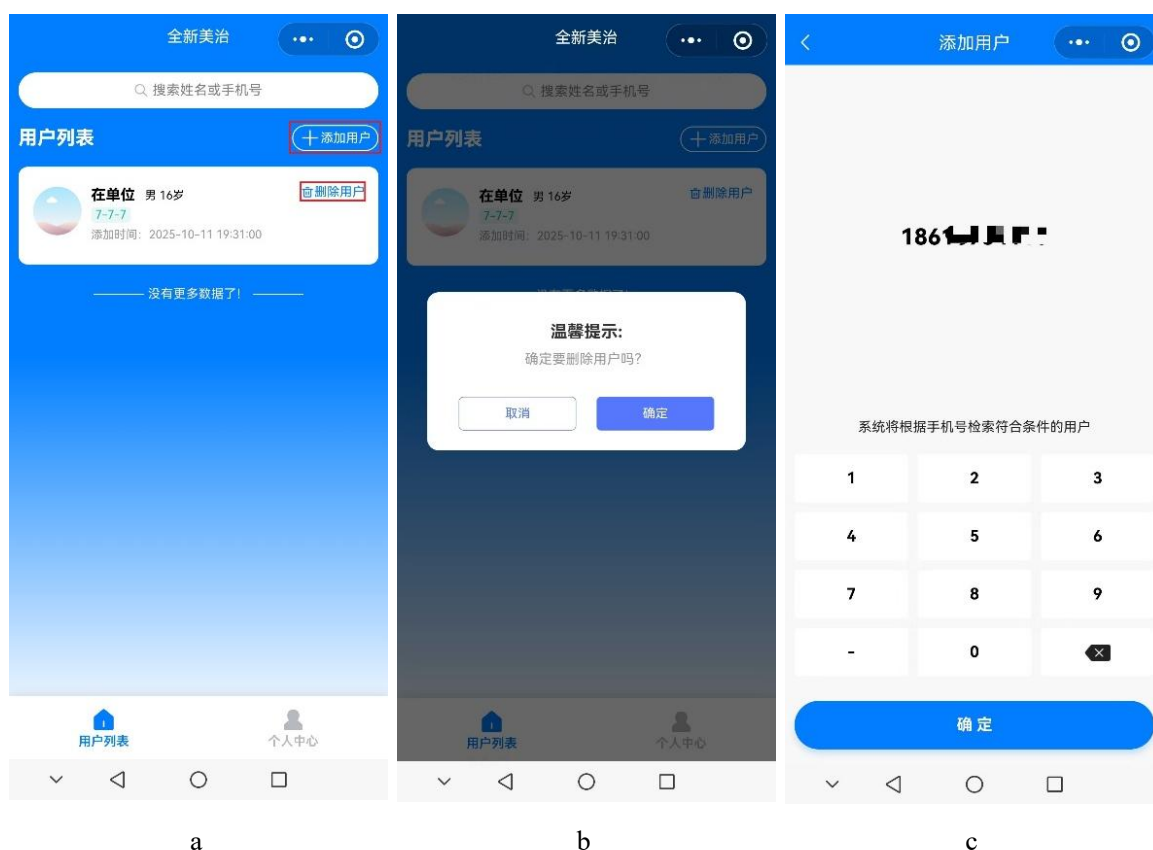


图 18 监护过程

- 1) 图 18a 展示了您已添加监护的用户名单，该名单中，用户已接受邀请，您可以点击其信息旁的“删除用户”按钮（位于红框标注区域内），删除对该用户的邀请。随后，小程序将显示提示“确定要删除用户吗？”（图 18b），请点击该提示框中的“确定”以完成操作；

- 2) 点击图 18a 中红框标注的“添加用户”按钮，即可进入“添加用户”界面（图 18c）。在该界面输入您希望监护的用户手机号，并点击“确定”按钮；后续操作步骤请参照图 17d、图 17e 与图 17f 的指引完成。

3.2 查看用户数据

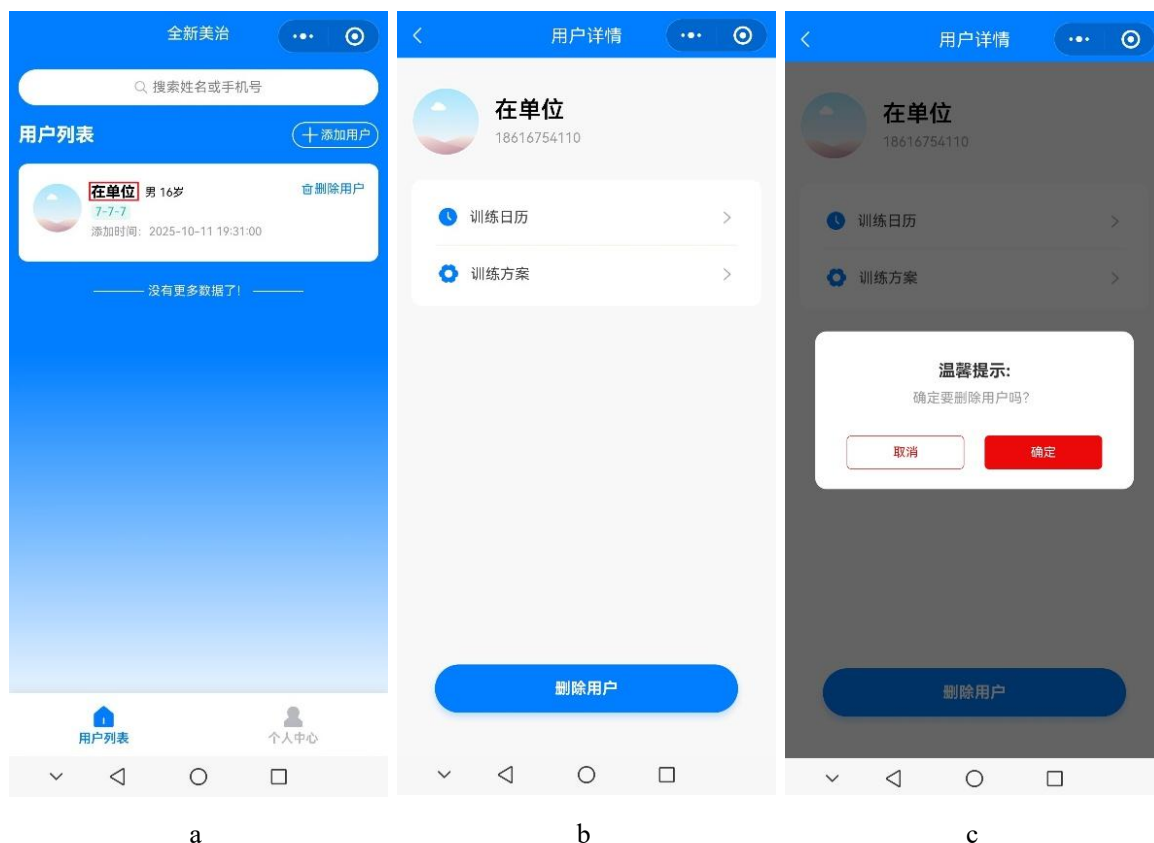


图 19 查看用户数据

- 1) 图 19a 的已监护用户名单中，点击目标用户的“用户名称”按钮（红框标注区域），即可查看其详情界面（图 19b）；
- 2) 如图 19b 所示，您可以查看到目标用户的训练日历以及训练方案，训练日历包含训练日志、当天训练统计、当天训练趋势、前 20 天训练趋势图、当天训练数据等信息，如段落 4.1 和 5.1 所示。
- 3) 如图 19b 所示，您可以选择点击“删除用户”按钮删除当前监护用户。随后，小程序将显示提示“确定要删除用户吗？”（图 19c），请点击该提示框中的“确定”以完成操作。

3.3 监护个人中心

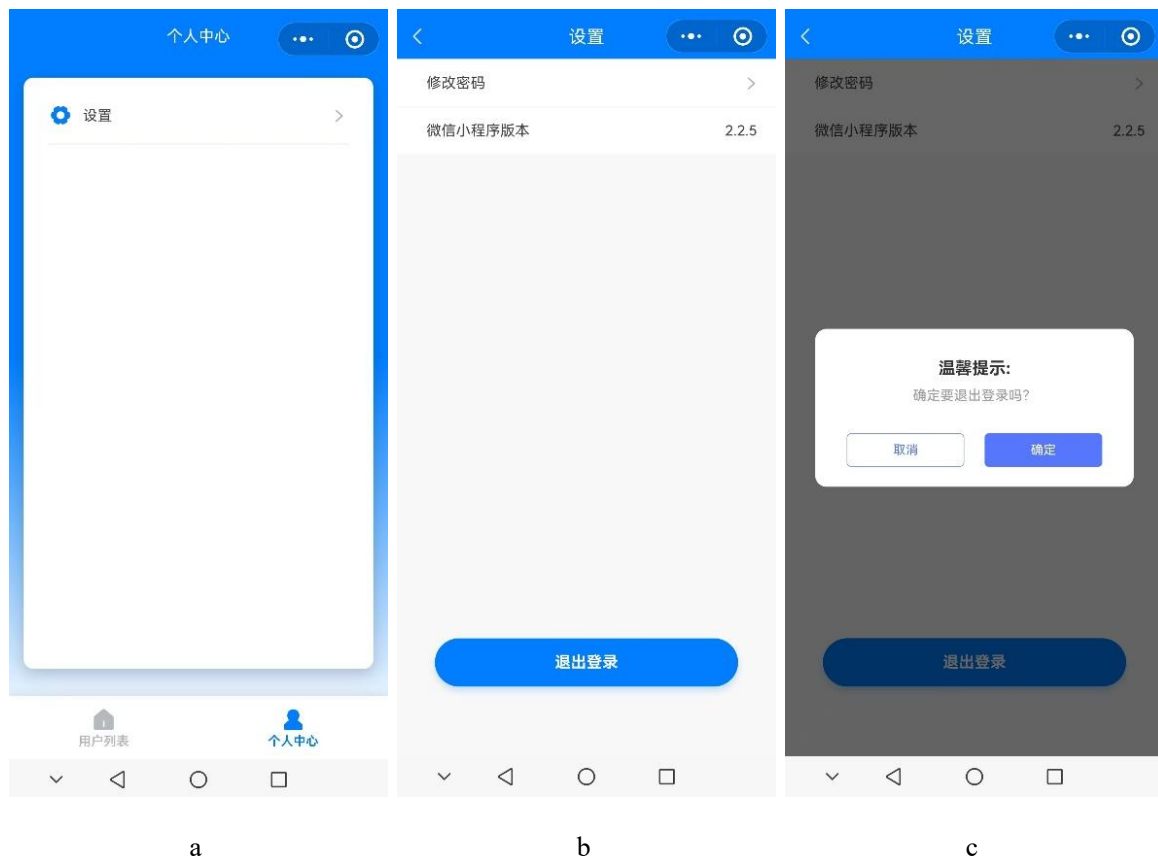


图 20 监护个人中心

- 1) 点击底部导航栏的“个人中心”图标（图 20a），进入相应页面后，再点击其中的“设置”选项，即可进入图 20b 所示的设置界面。在此界面中，您可查看当前微信小程序的版本信息；
- 2) 点击图 20b 中的“修改密码”图标，即可进入密码修改流程，对监护密码进行更新；
- 3) 点击图 20b 的“退出登录”按钮后，小程序将弹出确认提示框（图 20c），显示“确定要退出登录吗？”。点击提示框中的“确定”即可完成退出；或点击“取消”以放弃该操作。

注册人名称：苏州全新美治智能科技有限公司

注册人住所：昆山市花桥镇逢星路 586 号 6 号房二楼 2001 室、2002 室、2006 室

生产企业名称：苏州全新美治智能科技有限公司

生产企业联系方式：昆山市花桥镇逢星路 586 号 6 号房二楼 2001 室

生产地址：昆山市花桥镇逢星路 586 号 6 号房二楼 2001 室、2002 室、2006 室

全国服务热线：400-XXXX-XXXX

官方网站：www.sz-qxmz.com



微信小程序二维码